



exeol sept EA

Detergente desinfectante enzimático con pH neutro

► Solución enzimática para diluir para la limpieza y desinfección por inmersión de dispositivos médicos reutilizables invasivos y no invasivos, antes de la esterilización o desinfección final.

▪ Efecto detergente potenciado por tensioactivos unidos a un dúo enzimático esencial.

▪ Activo en 10 minutos con una dilución del 0,4% (bactericida, levuricida y viricida contra los virus envueltos).

Poder detergente probado en biopelícula según NF EN ISO 15883-5: 2021.

▪ Contiene un agente quelante de iones metálicos y alcalino-terrosos fácilmente biodegradable.



INSTRUMENTOS ENDOSCOPIA

PRODUCTO

ACTIVO AL 0,4%

ACTIVO DESDE 10 MIN.

DETERGENCIA REFORZADA

BUENAS PRÁCTICAS



Instrucciones de uso

• Dosis 20 mL:

Cortar la dosis usando las líneas de precorte. Verter una dosis de 20mL en 5L de agua a temperatura ambiente; 0,4% (4mL/L).

• Frasco dosificador 1L:

Quitar el tapón y presionar los laterales del frasco para obtener la dosis deseada. Diluir la dosis obtenida con agua a temperatura ambiente; 0,4% (4mL/L).

Volver a cerrar el frasco después de su uso.

• Bidón 5L:

Cuando se use por primera vez, retirar el anillo de inviolabilidad y luego desenroscar el tapón. Fijar la bomba de 20 mL en el bidón y cebarla. No utilizar la dosis obtenida hasta que la bomba esté completamente cebada. Usando la bomba dosificadora, diluir el concentrado con agua a temperatura ambiente; 0,4% (4mL/L).

La solución diluida y no utilizada se puede conservar en una bandeja cubierta durante 72 horas.

Uso:

1. Colocar los dispositivos médicos abiertos y desmontados en la solución y asegurarse de que estén totalmente sumergidos. Limpiar, cepillar, escobillar e irrigar los canales, si es necesario.

2. Tiempo de contacto; 10 min. Respetar el tiempo de contacto recomendado.

3. Retirar los dispositivos médicos y aclararlos cuidadosamente con agua.

La solución utilizada debe cambiarse después de cada uso.

exeol sept E2 puede utilizarse en una cubeta de ultrasonidos.

Presentación comercial

• Caja 250 x 20mL; EXS0048

• Caja 6 x 1L dosificador; EXS0046

• Caja 4 x 5L + 1 bomba 20mL; EXS0087



Archivo del producto disponible en www.exeol.fr

DM de clase IIa

Marcado CE obtenido en 2023



SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL

exeolsept EA

Detergente desinfectante enzimático con pH neutro

Propiedades microbiológicas

Condiciones de suciedad, 0,4%, 10 min, 20°C:

	ENSAYOS	CEPAS	CONCENTPACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0,4%	5 min.
	EN 14561		0,4%	10 min.
Levuricida	EN 13624	<i>Candida albicans</i> Cepa adicional: <i>Candida auris</i>	0,4%	5 min.
	EN 14562			
Viricida contra los virus envueltos ¹	EN 14476	<i>Virus de la vacuna</i> ¹ cepa <i>Elstree</i>	0,4%	10 min.
	EN 17111			

¹ El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus envueltos que se presentan en el Anexo A de las normas EN 14476+A2 y EN 16777 y en el Anexo B de la norma EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB) Virus de la hepatitis C (VHC) Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Herpesviridae (virus del herpes) Coronavirus Virus de la gripe, la rabia, la rubéola, el sarampión ...

Composición	Características	Precauciones
Cloruro de didecildimetilamonio, tensioactivo no iónico, enzimas (proteasa y lipasa), colorante, perfumes y excipientes.	· pH puro: 7 - 8 · pH 0,4%: 6,5 - 7,5 · Perfume*: Limón · Color: Azul	Lea siempre la etiqueta y las informaciones sobre el producto antes de usarlo. UFI : HVF9-R09E-4007-EJ19

*Perfume sintético



SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr


UNA DIVISIÓN DE SODEL